



Toujours à portée de main...

NOTICE D'UTILISATION

Les produits LAKKANE sont des dispositifs paramédicaux brevetés apportant de la sécurité à leurs utilisateurs, ils diminuent les risques des chute et apportent un renforcement de l'autonomie, dans un confort au quotidien.



A LIRE AVANT UTILISATION - Précautions d'usage

Nous vous conseillons de vérifier que votre main fasse bien le verrou sur la poignée de votre béquille équipée du dispositif BEKKANE. Dans le cas contraire, ne pas utiliser.

PORTEURS DE PACEMAKER

Les porteurs de pacemaker peuvent utiliser les produits LAKKANE. Nous recommandons une distance d'au moins 35 cm entre les dispositifs magnétiques BEKKANE et KKANE et le pacemaker.

CARACTERISTIQUES

Les dispositifs LAKKANE ne comportent pas de latex, sont très résistants et répondent à un cahier des charges strict élaboré pour les utilisateurs.

ENTRETIEN - NETTOYAGE

Les dispositifs LAKKANE sont lavables à l'eau claire avec ou sans savon. Pensez à enlever l'aimant dans ce cas et à le remettre une fois le logement sec. Concernant les DOKK, leur conception répond à un cahier des charges strict permettant des nettoyages et des asepties au quotidien.

BEKKANE

Le système magnétique BEKKANE s'adapte à la plus grande majorité des cannes anglaises (béquilles).

INSTALLATION



1 - Tenez fermement la béquille d'une main et de l'autre, positionnez le manchon de BEKKANE en commençant par la sangle du bas ne comportant pas l'aimant.

2 - Tirez fermement BEKKANE vers l'arrière de la poignée de la béquille, la sangle du bas bien positionnée sur la poignée.



3 - BEKKANE est installé !



4 - Au besoin, ajustez la sangle du bas pour qu'elle se trouve juste derrière le rebord de la poignée de la béquille.

UTILISATION

Grâce à BEKKANE, vous pouvez relier vos béquilles entre elles en écartant légèrement les pieds et ainsi les poser contre n'importe quelle surface. Vous pouvez ramasser vos clés tombées par terre grâce aux dispositifs magnétiques sans vous baisser.




CONSEIL

Pour une fixation optimale de DOKK sur un mur, ce dernier ne doit pas être poreux ou farineux (plâtre non peint, béton poreux, enduit brut...). DOKK peut se fixer sur un mur peint ou carrelé, tapisserie de qualité, bois, métal, verre... Nettoyez et dégraissez la surface avant la pose avec la lingette fournie. Après la pose, il est conseillé de ne pas utiliser le dispositif avant 24 heures.

INSTALLATION

1 - Posez la béquille ou la canne pied au sol contre le mur puis positionnez DOKK au-dessus du point d'accroche. Ceci est la hauteur minimale d'installation.

2 - Retirez la protection de l'adhésif et collez. Appuyez fortement durant 10 secondes. DOKK est installé.

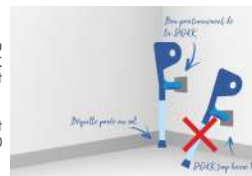

KKANE

Le système magnétique KKANE s'adapte à tous les diamètres de cannes.

INSTALLATION



1 - Positionnez idéalement KKANE à une distance d'environ 6 à 10 cm sous la poignée, ouverture de l'aimant vers le bas.



2 - Insérez la sangle dans l'ouverture la plus proche de l'aimant, par l'arrière du système. Tirez pour serrer le dispositif autour de la canne.



3 - Repassez la sangle dans la seconde ouverture et tirez. Vous pouvez couper si vous le souhaitez le surplus de sangle en laissant au minimum un picot ou deux.

UTILISATION

Avec DOKK dans la poche, vous pouvez fixer votre canne pour ouvrir votre portière, chercher votre monnaie, vous servir à un buffet... Elle reste toujours à portée de main.

Si vous avez des questions sur les produits LAKKANE ou si vous avez des difficultés d'installation, vous pouvez envoyer vos demandes à info@lakkane.com. Vous pouvez consulter notre site internet pour plus d'informations : www.lakkane.com.